

DK Brugsanvisning

Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 kategori II om personlige værnemidler (PV'er), er typeafprøvet og CE-mærket. For at bruge dette produkt sikkert, skal brugeren have læst og forstået brugsanvisningen, før brugeren anvender det for første gang.

Anvendelse

Produktet beskytter mod smådråber og væskestænk. Det reducerer risikoen for infektion via smådråber. Produktet giver ingen beskyttelse mod mekaniske påvirkninger. På grund af konstruktionen gives der kun i begrænset omfang fuld beskyttelse mod vira, bakterier eller andre biologiske agenser. Kan kombineres med beskyttelsesmasker til ansigtet. Bortskaffes efter brug. Brugeren skønner over, om visiret kan genanvendes. Vi anbefaler at du ikke anvender produktet i mere end 2 år. Levetiden på produktet er afhængig af flere faktorer, såsom anvendelse, rengøring, opbevaring. Hyppige skift af visiret anbefales ved hyppigt brug af ansigtsvisiret.

Opbevaring

Skal opbevares i original emballage i tørt lokale. Opbevares i lokale med en temperatur på mellem 18 °C – 23 °C. Luftfugtighed på ca. 55 %. Produktet kan anvendes i 2 år fra købsdato.

Rengøring og desinfektion

Med rent, lunkent vand og husholdningsrengøringsmidler (ingen baser, syrer eller opløsningsmidler). Undgå kraftig mekanisk rengøring. Visiret kan desinficeres med almindelige desinfektionsmidler, der fås i handlen.

Risici

Produktet giver ingen beskyttelse mod mekaniske påvirkninger. Det giver ikke beskyttelse mod stråling (f.eks. solstråling, UV, svejsning, IR). Produktet er kun til brug ved stuetemperatur og er ikke brandbestandigt. Hvis produktet bæres over et par briller med korrektion, kan mekaniske påvirkninger (f.eks. stød) overføres og dermed udgøre en fare. Brug ikke et beskadiget visir, det kan påvirke synet igennem og beskyttelsen. Hvis øjenbeskyttelsesanordningen er beskadiget, skal den udskiftes (skarpe kanter kan føre til kvæstelser). Materialet som kommer i kontakt med huden, kan være årsag til allergisk reaktion, hos personer med følsom hud.

Tilbehør

Udskiftningsfolier til dette ansigtsvisir fås hos DURABLE med varenummer 343219 (10 stykker i en pose).

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen findes på: www.durable.eu/3431CE

Certificeringsmyndighed

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Tyskland. Notified body no. 0196 Produktet er i overensstemmelse med følgende EU-regler: Forordning (EU) 2016/425 personlige værnemidler (PV'er) og direktiv 2001/95/ EF om produktsikkerhed i almindelighed, harmoniseret standard EN 166:2001 kategori II